

ソフトコンタクトレンズ用保存・すすぎ液  
**ソフトコンプラス**

**抗菌**

スティック入り

レンズや目に有害な雑菌の繁殖を抑えた  
0.9%の食塩水です。



500mL



製造販売元  
大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷3-14-16

大洋製薬お客様相談窓口

☎0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

ソフトコンプラスの特徴

- ① ソフトコンタクトレンズの  
コールド消毒及び煮沸消毒後  
のすすぎ液としてご利用いた  
だけます。
- ② 煮沸消毒・蛋白除去の酵素溶解  
液としてご利用いただけます。
- ③ 開栓後も抗菌スティックの  
効力により、クリーンな状態  
を保ちます。(レンズを消毒  
するものではありません。)

〔用途〕

ソフトコンタクトレンズの保存・  
すすぎ液として

製造番号

使用期限

〔保管及び取り扱い上の注意〕

1. 直射日光を避け、開封後は密栓して、なる  
べく冷蔵庫等の冷所で保管してください。
2. キャップ、ピンの口等は、清潔に取り扱い  
の上、なるべく早くご使用ください。
3. 他の容器に入れたものは、元に戻さない  
でください。
4. レンズのすすぎ・保存に使った液は、再度  
使用しないでください。
5. コンタクトレンズのケア以外の目的で  
使用しないでください。
6. 使用期限の過ぎたものは使用しないで  
ください。
7. もし目に刺激を感じたり、異常を感じた  
ときは、使用を中止し、医師又は薬剤師に  
ご相談ください。



「キャップのあけかた」  
指の腹で押し上げるように開けて  
下さい。

「注意」

爪をかけて持ち上げると爪を傷つける  
おそれがあります。



- ① ボトルの真ん中を両手で持ち、つぶす。
- ② しっかりと押さえ込んだ後、空気が  
入らないようにキャップをしめ、  
廃棄する。



キャップ:PE  
ボトル:PE  
外装フィルム:PP

B07-FL