

医療用品（4）整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏  
JMDNコード 34864000  
**ケアリーヴ™**  
**CARELEAVES™**

再使用禁止


**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

＊ ＊【形状・構造及び原理等】

本品は、高密度ウレタン不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる救急絆創膏である。

本品は滅菌済みである。

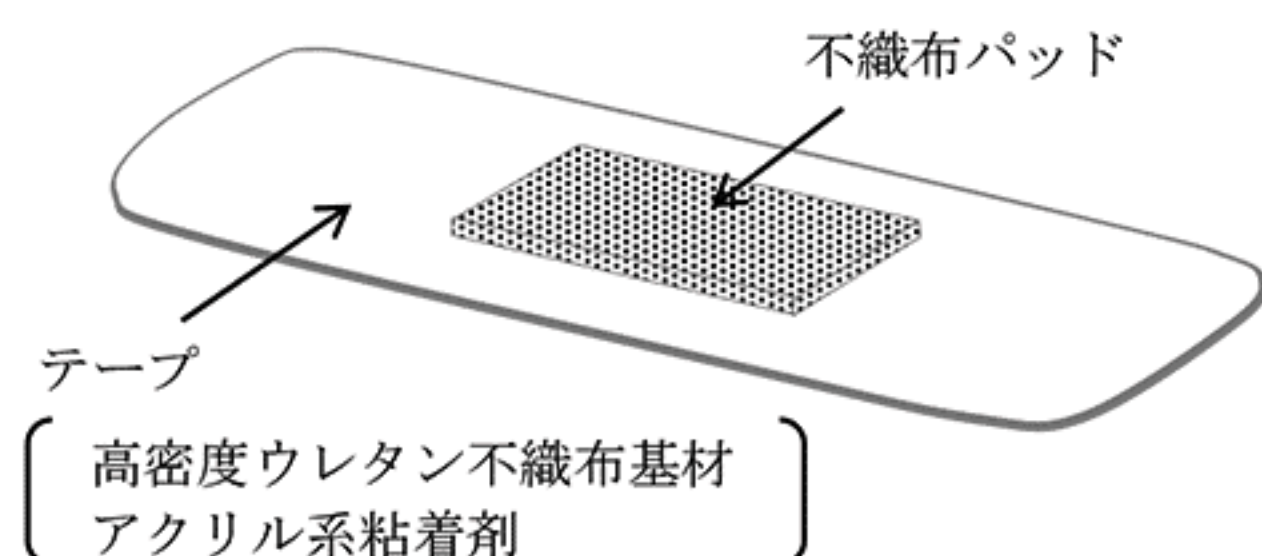

製品	テープ	パッド
Sサイズ	12mm×55mm	7.5mm×17mm
Mサイズ	21mm×70mm	13mm×22mm
Lサイズ	30mm×72mm	22mm×29mm
LLサイズ	50mm×70mm	25mm×35mm
ビッグサイズ	60mm×80mm	35mm×45mm
ジャンボサイズ	80mm×100mm	45mm×60mm
T型サイズ	58mm×55mm	16mm×30mm
円型サイズ	直径22mm	10mm×10mm
扇型サイズ	37mm×56mm	18mm×24mm
フリーサイズ	78mm×250mm	30mm×250mm
超大判Mサイズ	90mm×108mm	50mm×70mm
超大判Lサイズ	100mm×125mm	60mm×75mm

**【使用目的又は効果】**

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

TMは商標です。

**【使用方法等】**

1) 包装を開き、本品を取り出す。

＊ ＊2) はく離紙をゆっくりとはがし、創部にパッドをあて、周りのテープ部をしっかりと押さえて皮膚に密着させる。

**【使用上の注意】**

**1.重要な基本的注意**

＊ ＊1) 創部が汚れている場合は、創部及びその周辺の皮膚をよく洗浄し、水気がある場合にはふきとってから使用すること。

＊ ＊2) テープを伸ばさずに貼ること。

＊ ＊3) 皮膚の薄い箇所など、皮膚刺激が出やすい箇所への使用は控えること。

＊ ＊4) 本品の使用中に、創部に感染（傷の周囲が赤い、熱・はれがある、ズキズキした痛みが続く、膿をもつ等の異常がある）が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。

＊5) 本品の使用中に皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。

6) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合や、血液や滲出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼り替えること。

＊ ＊7) パッドサイズより大きな傷には使用しないこと。

**2.その他の注意**

1) 開封後、直ちに使用すること。

＊ ＊2) 貼る際は、テープ部分をよく圧着し、なるべくシワが入らないようにすること。特に関節部位や屈曲部位に貼る場合は、シワが入りやすいので注意すること。

3) はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

＊ ＊4) 貼り替えの際は同じ箇所に貼り続けず、テープを少しずつらして使用すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

保管方法：水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売元]

ニチバン株式会社

[お問合わせ窓口]

ニチバン株式会社 お客様相談室

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

TEL 03-5978-5622

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）