

# 医薬部外品 **リバテープW**

半透明タイプ **100**枚入  
スタンダード

販売名 **リバテープVCN**

滅菌済医薬部外品



## 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、本ケースを持って医師又は薬剤師に相談してください。使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

## 成分・分量

不織布 (100g中)  
日本薬局方 アクリノール水和物 0.4g

## 内 容 量

スタンダードサイズ  
(19mm×72mm) .....100枚

## 効能・効果

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、  
創傷面の消毒・保護(被覆)

## 用法及び用量

中央のパッドに触れないようにして剥離紙をはぎとり、パッドを傷口に当て、両側の粘着テープで皮膚に定着する。

- 傷口とそのまわりを清潔にし、水気を良く取って、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。水気があるとつきにくい場合があります。
- 皮膚の弱い方は同じところに繰り返し貼らずに、1日1~2回粘着面の位置を替えてください。
- パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなる場合がありますので、貼り替えてください。
- 粘着面を傷口に貼らないでください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

## 保管及び取扱い上の注意

- ご使用に際し、本ケースの表示を良くお読みください。
- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。
- 滅菌効果が損なわれますので、個別包装の開封は使用時に行ってください。
- パッド部分にアクリノールを使用しています。アクリノールの消毒効果を弱めますのでヨードチンキと同時に使用しないでください。

製造販売者



**リバテープ製薬株式会社**

熊本県鹿本郡植木町岩野45  
お客様相談室 0120-199-189